

機械器具 49 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器
管理医療機器 単回使用自動ランセット JMDN コード 37243002

再使用禁止

ワンタッチアクロディオ

【警告】

1. 採血部位に病原微生物が付着し感染の危険性があるため、採血部位を必ず消毒してください。また、採血後はばんそうこうなどで止血と保護を行ってください。傷口が治りにくいときには、医師の指導を受けてください。
2. 使用後の本品には血液が付着しています。病原微生物による感染を防ぐために、使用後は他人に触れないように廃棄してください。
3. 保護キャップをねじ切って取り外した状態で放置しないでください。[針が誤って発射される危険性があります。]


【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止。使用後は必ず廃棄してください。[感染の危険性があります。]
2. 使用時にすでに保護キャップが外れていたり、ゆるんでいる場合は使用しないでください。[感染の危険性があります。]

【形状・構造及び原理等】

材質

針	: ステンレス鋼
保護キャップ	: ポリエチレン
ホルダー	: ポリスチレン

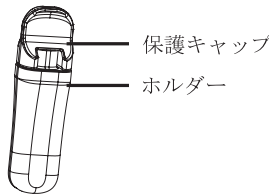


保護キャップの色	針の深さ	針の太さ
パープル	1.5mm	φ0.32 (30G)

【使用目的又は効果】


本品は血糖値測定等のための微量採血を目的とします。放射線滅菌済みですので、そのまま直ちに使用できます。

【使用方法等】


1. ホルダーをしっかりと保持し、保護キャップをねじ切り、引っ張って取り外してください。取り外した保護キャップはすぐに廃棄してください。

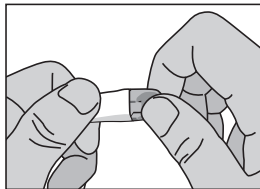


2. 採血部位を消毒綿を使って消毒し、十分に乾燥させてください。

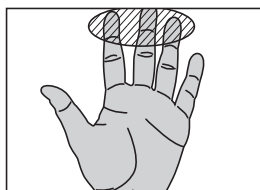

3. 本品の先端部分を採血部位に押し当てて、「カチッ」という音が出るまで押し付けてください。

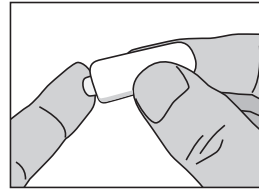

4. 採血部位より血液を採取してください。

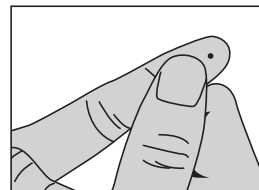

5. 使用後は本品をそのまま廃棄専用容器に入れ、安全に廃棄してください。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. 指先から採血する場合は、穿刺前に、必ず流水でよく手を洗ってください。
2. 果物等の糖分を含む食品などに触れた後、そのまま指先から採血すると指先に付着した糖分が血液と混じり、血糖値が偽高値となるおそれがあります。[アルコール綿による消毒のみでは糖分の除去が不十分との報告があります。]
3. 以下のような末梢血流が減少した患者の指先から採血した場合は、血糖値が偽低値を示すことがあります。
 - ・脱水状態
 - ・ショック状態
 - ・末梢循環障害
4. 耳朶等の組織が薄い部位への穿刺を行う場合には、穿刺部位の裏側を直接指で支えないでください。[組織を貫通した針で指を穿刺し、血液を介した感染のおそれがあります。貫通のおそれがある場合には、他の組織の厚い部位での穿刺について検討してください。]

＜その他の注意＞

1. 保護キャップを取り外したらすぐに使用してください。
2. 一度作動させると二度と作動しないので、採血時以外は作動させないでください。
3. 小児の手の届かないところに保管してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
水濡れや、直射日光、高温多湿を避けて保管してください。
2. 使用期間
箱に記載しています。[自己認証(当社データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 株式会社 旭ポリスライダー
〒719-3226 岡山県真庭市三崎 860-2
TEL 0867-42-1171

販売元 LifeScan Japan 株式会社

お問い合わせ先 ワンタッチコールセンター
0120-113-903(無料通話、24時間)